

## FICHA TECNICA

### 1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

- 1.1.- Denominacion tecnica** : Bolsa de agua caliente x 1L
- 1.2.- Nombre Comercial** : Bolsa de agua caliente x 1L
- 1.3.- Descripcion general** : Su principal objetivo aliviar dolores musculares y articulares comunes en padecimientos reumaticos generalmente en pacientes de la tercera edad.
- 1.4.- Marca** : Dismed
- 1.5.- Fabricante** : DROGUERIA DISTRIBUIDORA MEDCODENT EIRL
- 1.6.- Categoria** : Terapeutico
- 1.7.- Registro Sanitario** : No Requiere

### 2.- CARACTERISTICAS FISICAS DEL BIEN

- 2.1.- Material** : Caucho
- 2.2.- Resistencia** : 60° a 90° C en agua caliente
- 2.3.- Volumen** : 3234 cm<sup>3</sup>
- 2.4.- Alto** : 21 cm
- 2.5.- Ancho** : 16 cm

### 3.- INDICACIONES DE USO

1. Llenar la bolsa con embudo, o de lo contrario hacer el llenado lentamente, de esta manera se garantiza que el aire salga del interior de la bolsa.
2. Llenar la bolsa hasta tres cuartas partes de su capacidad con agua.
3. El agua no se debe mezclar con ningún tipo de material vegetal o solvente, ya que esta práctica deteriora la estructura química de la bolsa.
4. La temperatura del agua no debe ser mayor a 60°C (140°F), para evitar posibles quemaduras.
5. Cerrar la bolsa solo con la tapa original del producto.
6. Verificar el cierre correcto del producto para garantizar que no tiene fugas.
7. No usar el producto en contacto directo con la piel.
8. Después del uso, colgar la bolsa boca abajo hasta que se seque en su totalidad.

#### **4.- ADVERTENCIA, PRECAUSIONES Y CONTRADICCIONES**

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Este producto debe ser usado con precaución por personas que padezcan diabetes, tensión arterial alta, alteraciones o infecciones dérmicas o subdérmicas.
- Este producto no debe ser usado por personas que sufran cualquier afectación a la salud que pueda ser potencializada o agravada por el empleo de calor.
- En caso de usar este producto en niños hacerlo bajo la supervisión de un adulto responsable.
- No usar microondas para calentar la bolsa, está puede estallar.
- Si observa algún tipo de ranura, fisura o deterioro descartar el uso de este producto inmediatamente.
- El no cumplimiento de las recomendaciones y precauciones descritas pueden ocasionar graves perjuicios para la salud, tales como quemaduras en la piel por contacto directo con agua caliente.

#### **4.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

- Manténgase en un lugar seco a una temperatura ambiente.
- Se debe almacenar protegiéndolo de la luz y del contacto con productos químicos, especialmente solventes orgánicos.
- En el área destinada al almacenamiento, no deben mantenerse sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como: pinturas, pegamento, disolventes (thinner, varsol, gasolina) que no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.
- El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes.
- En lo posible el almacén debe estar dotado de ventilación adecuada sobre todo en climas cálidos o donde la humedad.